



Nasal  
Creator  
Device



รูปตัวอย่างก่อนและหลังการใช้อุปกรณ์



ก่อนการรักษา



การใส่อุปกรณ์หลังผ่าตัด 3 เดือน




ก่อนและหลังการรักษา



หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์  
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ตะวันฉาย

☎ เบอร์โทรศัพท์ : 043-363-123 และ 098-141-4710  
หรือ ติดต่อ คุณยุพิน ปัทกะสิงห์ 085-927-0324 และ  
คุณสุธีรา ประดับวงษ์ 081-263-8951

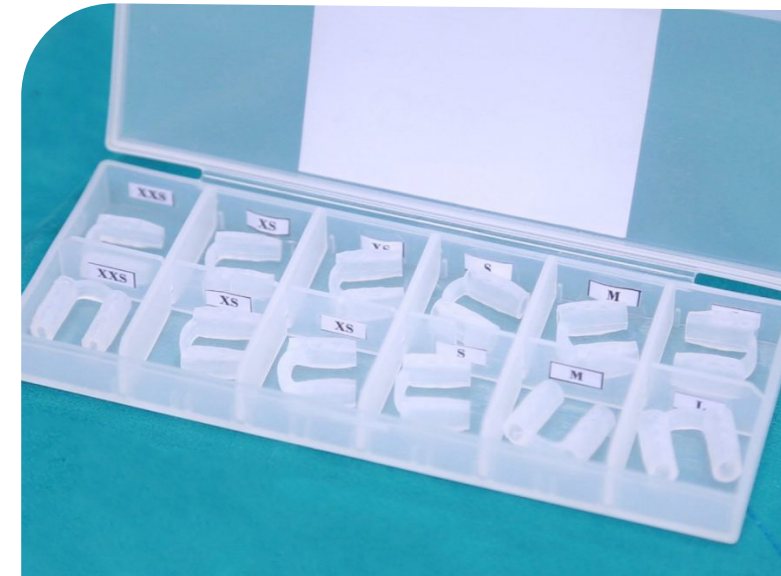

Nasal Creator Device

Nasal Creator Device  
อุปกรณ์เพื่อสร้างรอยยิ้มใหม่ให้น้อง ๆ

คู่มือการใช้   
เครื่องมือปรับแต่งจมูก  
สำหรับแพทย์ผู้ดูแล







# Nasal Creator Device

อุปกรณ์ปรับแต่งจมูกหลังการผ่าตัดเย็บริมฝีปากในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ (Nasal Creator Device) เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตจากซิลิโคนทางการแพทย์ (Medical grade silicone) เพื่อใช้ในการเพิ่มการคงรูปจมูกหลังการผ่าตัด โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO10993 และการรับรองอุปกรณ์ทางการแพทย์จากองค์การอาหารและยา (อย.)

## วิธีการใช้อุปกรณ์ Nasal Creator Device

1. หลังการผ่าตัดเย็บริมฝีปากเสร็จ ให้ศัลยแพทย์พิจารณาใส่อุปกรณ์ Nasal Creator Device ให้แก่ผู้ป่วย โดยเลือกขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดที่พอดี 1 เบอร์ (อุปกรณ์มี 7 ขนาด ดังภาพ) ทั้งนี้เพื่อให้มีขนาดที่พอดีสำหรับผู้ป่วย ภายหลังจากจมูกยุบวม ในกรณีอุปกรณ์ยาวเกินไปศัลยแพทย์สามารถพิจารณาตัดปลายขาอุปกรณ์ให้สั้นลงพอดีกับช่องจมูกผู้ป่วยได้ ซึ่งความยาวที่เหมาะสมควรวัดความยาวจากปีกจมูกถึงจุดสูงสุดของร่องจมูกของข้างที่ไม่เป็นโรค ดังตัวอย่างที่แสดง

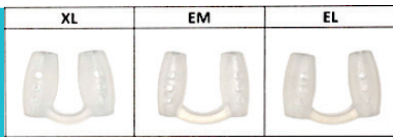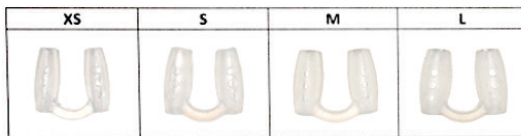


(1.1 ขนาดของอุปกรณ์)



(1.2 รูปตัวอย่างการวัดความยาวที่เหมาะสมในการใส่อุปกรณ์ Nasal Creator Device)


2. ก่อนใส่อุปกรณ์ Nasal Creator Device ให้ทาวาสลีนที่ตัวอุปกรณ์โดยรอบ จากนั้นใส่อุปกรณ์เข้าให้ตรงกับรูจมูก โดยให้ส่วนของท่ออุปกรณ์มีลักษณะลู่เข้าหากัน

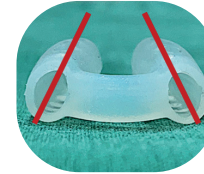

(2.1 ด้านหน้า)



(2.2 ด้านหลัง)

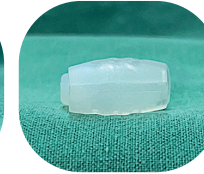

(2.3 ด้านบน)




(2.4 ด้านข้าง)



3. ภายหลังจากการผ่าตัดให้ผู้ป่วยใส่อุปกรณ์ Nasal Creator Device อย่างน้อย 3-6 เดือน หลังการผ่าตัดเย็บริมฝีปาก ทั้งนี้ศัลยแพทย์ต้องทำการนัดหมายเพื่อติดตามผลการรักษาจำนวน 5 ครั้ง โดยครั้งแรก คือ ภายหลังจากการผ่าตัด 2 สัปดาห์ จากนั้น คือ ภายหลังจากการผ่าตัด 1 เดือน 2 เดือน และ 3 เดือน ตามลำดับ สำหรับการติดตามผลครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ศัลยแพทย์ควรจะนัดหมายติดตามผล 6 เดือนภายหลังจากการผ่าตัด



4. ผู้ป่วยต้องถอดทำความสะอาดอุปกรณ์ Nasal Creator Device ทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้ง โดยการบิบล้างผ่านน้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว (วิธีการทำความสะอาดเหมือนการล้างขวดนม และสามารถใช้น้ำยาล้างขวดนมทำความสะอาดได้) จากนั้นซับอุปกรณ์ให้แห้ง ในกรณีมีคราบน้ำมูกแห้งติดอุปกรณ์ ให้ใช้ไม้พันสำลีเช็ดทำความสะอาดด้านในจนสะอาดเรียบร้อยก่อนใส่อุปกรณ์กลับเข้าไปในรูจมูก

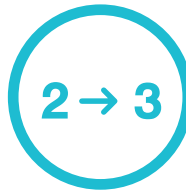

5. หากภายหลังอุปกรณ์ Nasal Creator Device หลวม ศัลยแพทย์ควรพิจารณาเปลี่ยนขนาดอุปกรณ์ให้ใหญ่ขึ้นตามความเหมาะสมของผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วย 1 คน อาจจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ Nasal Creator Device ประมาณ 2-3 ชิ้นต่อกัน

